

貼り付け便利な ピタパシート®

汚れ予防には
このシート



内視鏡室



手術室



カテ室



手洗い場など

特長

簡易脱着を実現

- ・床との接着面に弱粘着加工を施しており、床に簡単にくっつき、容易に剥がせます。
- ・ずれにくく、転倒事故の発生を抑えます。

固定テープ不要

- ・固定テープを貼る必要がないため、短時間での設置が可能！
- ・作業員一人でも貼ることができます。

高い吸水性

- ・血液や汚染水などの吸収性に優れ、床への拡散を防止します。

ロールタイプ



- ・自由にカットが可能のため、さまざまな用途・場所への対応が可能。

豊富なラインナップ

- ・使用用途に応じた製品ラインナップ。
(ロールタイプ・折りたたみタイプ・ミシン目入りタイプ・厚手タイプ)

シート+テープとの比較

準備・清掃など、作業労力が大きい。

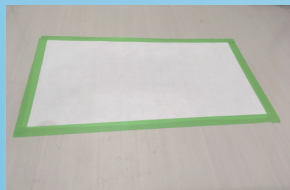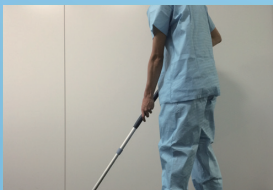

ピタパシートを
使用することで、
作業効率を改善。



規格

品番	サイズ	ケース入数	希望小売価格	JAN	吸水量(1m ² あたり)
PS-050	48cm巾×50m	1巻	12,600円	4933418630209	200g/m ²
PS-100	100cm巾×50m	1巻	21,000円	4933418630179	
PS-2100	100cm巾×50m	1巻	25,000円	4933418630254	400g/m ²
PS-2020	100cm巾×200cm	20枚	26,000円	4933418630261	
PS-2200	100cm巾×200cm ×25枚 (ミシン目加工)	1巻	28,000円	4933418630339	

推奨使用現場

アイテム	主な採用現場	現場コメント
■標準タイプ PS-050 PS-100	内視鏡室 カテ室 手洗い場他	●従来、カテ室では手技の都度、モップをかけていたが、ピタパシートのおかげで、清掃時間を短縮することができた。
■高吸水タイプ PS-2100 PS-2020 PS-2200	手術室 手洗い場 カテ室他	●吸水量が多いため、水が多く出る場所でも安心して使用することができた。

使用方法



1 粘着面を貼付対象物（床など）の上に置き、シート端部 20~30cm を押し付け固定。



2 ロールを転がして展開。



3 適当な長さで切り、軽く押さえる。



4 使用後は容易に剥がせます。

注意事項

- 床の材質によっては貼りつきにくい、剥がしにくい場合があります。ご使用前に本品小片を貼付面に貼り、貼りつき具合をご確認ください。また、貼付面にアルコール水溶液があると、強固に貼りつき、剥がれない場合があります。その際はエタノール水溶液で膨潤させ、剥がしてください。
- 長期間貼付した場合、剥がれにくくなる事があります。また、汚れ防止のため、1日1回の貼り替えを推奨しております。
- 貼付面に砂やほこりがあると十分に貼りつかない場合がありますので、きれいに拭いてください。
- 開封後は包装紙で包み、清潔な冷暗所に保管してください。

販売元

VC バイリーン クリエイト株式会社

■ 本社
 〒104-0045 東京都中央区築地 5-6-4
 TEL : 03-4546-1183 FAX : 03-4546-1149

■ 大阪営業所
 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3-5-19 (大阪ティアーアイビル)
 TEL : 06-6281-1116 FAX : 06-6121-9703

■ 名古屋営業所
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-2-12 (NUP伏見ビル)
 TEL : 052-203-4530 FAX : 052-203-1475

製造元

vilene 日本バイリーン株式会社